



<分解・再組立手順 \* 分解手順は ↓ で、再組立手順は ↑ で示しています>

**1.酸素リザーババッグを外します。**

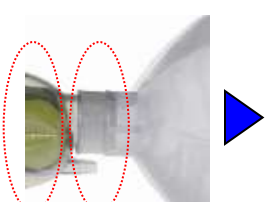


部を両手で持ち軽くひねります。

**2.患者バルブを外します。**

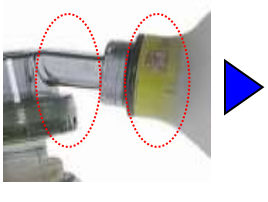


部を両手で持ち軽くひねります。

**3.患者バルブからマスクを外します。**




患者バルブとマスクをそれぞれ持ち軽く引っ張ります。

**4.患者バルブを分解します。 7.患者バルブを組立ます。**




部分を時計と逆方向に回して外し、リップバルブとディスクメンブレンを外します。

**5.マスクを分解します。**




カバー部とマスク部をそれぞれ持ち、軽く引っ張ります。


**10.酸素リザーババッグを取り受けます。完成。**




**11.酸素リザーババッグを取り受けます。完成。**




**12.酸素リザーババッグを取り受けます。完成。**




**13.酸素リザーババッグを取り受けます。完成。**

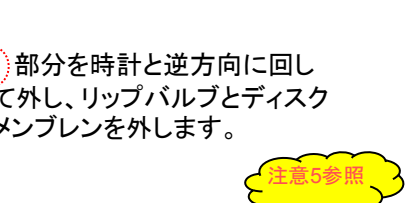


**14.酸素リザーババッグを取り受けます。完成。**



**15.酸素リザーババッグを取り受けます。完成。**




**6.リザーババルブを外します。**




部を時計と反対方向へ回します。

**7.リザーババルブを分解します。**

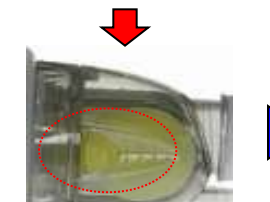


両側の 部を親指と他の指で押し、圧力をかけて外します。

**8.フラップバルブを外します。**

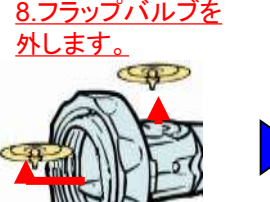

指先でフラップバルブをめくり、引き抜きます。


**9.インテークバルブを外します。**




換気バッグを軽くつぶし、インテークバルブを横にしてつまみ出します。

インテークメンブレンを指でめくり外します。

**10.完了**



**1.パーツを確認します。**



<分解・再組立時の注意事項>

**【注意】各パーツが必ず写真のようにしっかりとハマるようにしてください。**

**<注意1. リザーババルブ>**



酸素ニップルが水平になるように持ち、フラップバルブを図のように差し込みます。キャップをはめます。

**Point** フラップバルブがしっかりとハマるよう指で軽く引っ張ります。



ポッチが穴の下に来るようにはめて下さい。

○適切な状態 ×不適切な状態



**<注意2. インテークバルブ>**



図のようにインテークメンブレンを取付けます。

**⚠ インテークメンブレンとディスクメンブレンは大きさが違います。ご注意ください。**

ディスク インテークメンブレン

○適切な状態 ×不適切な状態



**<注意3. インテークバルブの取り付け>**



図のように換気バッグの中に入れ突起を縁に這わせてはめます。

**Point**



換気バッグの上から押し上げるようにするとうまくハマります。

**<注意4. リザーババルブの取り付け>**



インテークバルブの溝にあわせてリザーババルブを取付けます。

**<注意5. 患者バルブ>**



図のようにディスクメンブレンを取付けます。

**Point**



指でディスクメンブレンを軽く引っ張りながら装着します。

○適切な状態 ×不適切な状態



○適切な状態 ×不適切な状態



**⚠ リップバルブは必ず1枚だけ装着してください。**

**<注意6. マスク>**



マスクにカバーを取付けます。

**Point**



両手で押し込むようにはめます。

**<7. 全てのパーツを組み立てます。>**

