

# シミュレータ WiFi 接続マニュアル



レールダル メディカル ジャパン株式会社

WiFi Manual Rev.I

www.laerdal.com

# PC 起動方法 (SimMan ALS の例) -

### Step |

#### PCの電源を入れる

🕕 ヘッドセット、WEB カメラを PC に接続する

<mark>-</mark> Instructor PC に ------ ヘッドセット

を接続する

● Patient Monitor PC に ── WEB カメラ SpO2 プローブ を接続する



PC の電源を入れる際 は事前に シミュレータ本体側の 「咳・呼吸音」、 「WiFi ランプ点灯」を 確認する



2 Instructor PC および Patient Monitor PC の 電源を入れる



※SimPad PLUS をご利用の方は、 ページ③の Step 1「SimPad PLUS の起動」を ご参照ください。

## Step 2

Patient Monitor PC のソフトウェア起動

ILaerdal Simulation Home」を Patient Monitor」をクリックする ダブルクリックする Laerdal Simulation Home LEAP ④「セッション開始」をクリックして 3 シミュレータを選択する セッションを開始する LLEAP シミュレータの選択 80 98 思者シミュレータ ローカルコンピュータ LAN: 接続 Wifi: 接代第) 水之ト和--12 セッションが開始されていません 0. タスクトレーナ Z 0

(1)

# PC 起動方法 (SimMan ALS の例)

Instructor PC のソフトウェア起動

## Step 3





2

# PC 起動方法 (レサシアンシミュレーターの例) ― 1/2

### Step |

#### SimPad PLUS の起動

※「Windows10」かつ「LLEAPのVerが6.1以下のPC」には、別途小型USB-WIFIアダプタが必要になります。



次ページに続く

# PC 起動方法 (レサシアンシミュレーターの例) ― 2/2

#### Step 2

#### Patient Monitor PC のソフトウェア起動



③「Patient Monitor」をクリックする



5 バイタル画面が表示される →「セッション開始」をクリックする



Auto Launch 機能を設定している場合は ③、④は省略されます。

4

"接続ができませんでした"のメッセージが出た場合は 「戻る」 ボタンを押してください。

#### 6 SimPad PLUSで セッション開始する



Caerdal Simulation Home」を ダブルクリックする



④「シミュレータ」を選択する



# WiFi 接続トラブルフローチャート

#### WiFi 接続不良の不具合があった場合は、以下のフローチャートに従ってご対応ください。

※Wi-Fiの無線干渉を防止するため、使用しないWiFiはできるだけOFFにしてください。



### 「SimLink」あるいは 「my-Simpad-net」と表示されている場合

 WIFI「接続済み」でかつ 「SimLink」と表示されている



2「無線アダプタの無効化」を 「有効化」に設定する



3 右下の無線マークを右クリックし、 「ネットワークと共有センターを開く」を クリックする





④「「アダプターの設定の変更」をクリックする

5 WIFI のアイコンを右クリックして、 「無効にする」をクリックする





整理・	このネットワーク デバイスを有	「効にする この接続を診断する	この接続の名前を変更する	この接続の設定を変更する	
	Bluetooth ネットワーク接続 後続されていません Bluetooth Device (Person	WI-FI			
X Ø		∮ ∮ 有効にする(A)	Fireless-AC 72		
		沃陈(U)			
		診断(1)			
		ショートカットの作成(S)			
		💔 Atlê(D)			
		😻 名前の変更(M)			
		70/574(R)			

### 「接続」 状態だが 「SimLink」 以外が表示されている場合

 「Network Selector」を利用して SimLink への接続を行う

Laerdal Pat Patient Monitorを以下に	tient Monitor 接続するシミュレータを選択する
ネットワークの状態 LAN: 接続されていません WiF: 接続済み.anne-guest_ ホスト型: <u>=</u> <u></u>	患者シミュレータ
<b>患者シミュレータ</b> 第472-1-3789 2094ません 毎年中、	<del>с</del> оњ
	詳細太了ション

2 「Network Selector」をクリックする



1/2

#### 4 「OK] をクリックする

SimLink」を選択する
 ※「SimLink」が表示されていない場合は、
 画面右下の WIFI マークを確認

DG-DEV-A その他のネッ	トワーク	î
FS-S-AP01 その他のネッ	トワーク	
GD01F-76E373 その他	ロネットワーク	
Laerdal_Training2 ₹	の他のネットワーク	
Laerdal_Training5 そ	の他のネットワーク	_
LVL その他のネットワーク		
W1568AEOB その他の	ネットワーク	
SimLink Ad Hoc		

5「はい」をクリック

Windows のユーザーアカウント制御に関する 警告が出た場合は、「はい」をクリックする

■ 🖉 🕸 📣 📟 A 🕑 17:53

	の他のネットワーク				<u>^</u>
nLink およびそ	の他のアドホック接続は	この PC でサポートされていません			
() Acteu - Fi	この PC の現在のネット ドライバをダウングレード ドライバをインストールし ライバが正常にダウングレ	ワークドライバでは、SimLink およびその他 にれば、この種類の接続が可能となる場合 、アドホック接続の使用をサポートするパー <i>ドされなかった場合、代わりに有線ネット</i>	のアドホック接続の使用だ があります。 -ジョンにダウングレードしま <i>ワークまたはワイヤレスイン、</i>	『サポートされていないことが検出され すか? フラストラクチャネットワークを使用す	れました。 <i>さ必要があります</i>
	ドートを必要とされる場合	は、最寄の Laerdal テクニカルサービス担	当者までお問い合わせくだ	200	
情報およびサオ		はい(こちらを推奨します)	UUŽ		









(7)

### 「接続」状態だが 「SimLink」 以外が表示されている場合

#### ⑦「アドホックネットワーク"SimLink "に 接続してください」をクリックする

112

- Contraction of the Contraction		
	SimLink ネットワークに接続中です	
Link Box には、現在 'SimLi のないアドホックネットワークで 壁のコンセントに接続すること	nk' という独自のシミュレーションネットワークがありますが、これはインターネッ です。'SimLink' に接続中に SimStore/インターネットにアクセスするには、LA をお勧めします。	ト接続環境 N ケーブルを
お使いのネットワーク構成を変 できません。改めて過常のワイヤレスネッ てください。ネットワーク構成がデフォルト	更するために、アドホックネット・ワークハ腫癌するには、LIEAP が必要です。新規構成では、別のネット トナープに接続する場合は、LIEAP の使用可能なシミュレータネットワークの一覧を使用して別のネッ 投定の状態に戻ります。	・ワークへの接続は トワークに接続し
	アトホックネットワーク SimLink に接続してくたさい	

8 SimLink に接続完了

SimLink Ad Hoc このネットワークに接続済み	[
anne その他のネットワーク	
ANNE その他のネットワーク	
anne-guest その他のネットワーク	
Laerdal_Training5 その他のネットワーク	